

FFP2 NR Partikelfiltrierende Halbmasken 3 Stück - Für den einmaligen Gebrauch



BENUTZUNGSANWEISUNGEN

1. Orientieren Sie sich, welche Seite der Maske oben und welche unten ist.



2. Legen Sie die Schutzmaske an und drücken Sie den Metallstreifen der Maske unter dem Nasenbein zusammen, damit Sie sich der Form Ihrer Nase anpasst.



3. Ziehen Sie die Unterseite der Maske etwas nach unten, sodass der Mund und das Kinn bedeckt sind.



4. Prüfen Sie den Sitz der Maske so, dass keine Nebenluft gezogen wird. Prüfen Sie eventuelle Nebenluft durch Gesichtsbehaarung. Korrigieren Sie ggf. den Sitz, bis die Maske dicht sitzt.

Die Atemschutzmasken dienen dem einmaligen Gebrauch. Bitte nach Gebrauch, bei Feuchtigkeit, bei sichtbaren Verunreinigungen oder bei ungenügender Passung durch eine neue, trockene, saubere und gut sitzende Maske ersetzen. Haltbarkeit des Produkts: 3 Jahre bei Lagerung bei Temperaturen von 5 °C bis + 25 °C und bei einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 60%. Die Maske entspricht DIN EN 149:2001+A1:2009, PSA Klasse III und ist CE zertifiziert. Die Kennzeichnung NR bedeutet, dass die Maske für maximal eine Arbeitsschicht (8 Stunden) verwendet werden darf. Missachtung dieser Anweisungen oder falsche Anwendung können die Wirksamkeit der Maske reduzieren bzw. Erkrankungen oder dauerhafte Schäden zur Folge haben.

Produktionsdatum: 13.12.2020

LOT Nummer: M1



Produziert von:

SKG Productions GmbH
Südring 40
D- 21465 Wentorf

Kontakt:

info@soviesshop.de | soviesshop.de
info@mank.de | mank.de
+49 (0)2689 - 9415 - 4747

Artikelnummer:

4270001575807
CE
2797

