

FFP2 Atemschutzmaske





Wichtig: Vor dem An-oder Ablegen der Maske Hände gut waschen oder desinfizieren!

1. Öffnen Sie die Maske und formen Sie den Nasenbügel mit Ihren Fingern.
2. Legen Sie die Maske mit den Ohrenbügeln nach hinten in Ihre Hände.
3. Befestigen Sie die Maske zunächst am Kinn und ziehen Sie die Maske danach vorsichtig über die Nase.
4. Halten Sie die beiden Ohrenbügel nach außen und streifen Sie die Maske über Ihre Ohren.
5. Drücken Sie die Maske im Nasenbereich und am Kinn an.
6. Passen Sie mit beiden Händen den Nasenbügel vorsichtig an den Nasenrücken an bis:
 - a. die Maske gut anliegt
 - b. bequem sitzt
 - c. gut abdichtetBenutzen Sie bei der Anpassung der Maske unbedingt beide Hände, um eine möglichst gute Wirksamkeit der Maske zu erreichen.
7. Atmen Sie zur Kontrolle tief ein, um die Funktionsfähigkeit der Maske zu überprüfen. Beim Einatmen sollte sich das Filtermaterial bewegen.
8. Prüfen Sie unbedingt, dass die Maske dicht sitzt.
9. Wenn Sie feststellen, dass die Maske nicht dicht sitzt, drücken Sie den Nasenbügel zur individuellen Anpassung etwas fester zur Nase an.

**Filterklasse FFP2 Verordnung EU 2016/425
EN149:2001 und A1:2009**

CE 2797

 **12/2020**

 **12/2023**